

Suma Tab D4 Tab

Preparat na bazie stabilizowanego aktywnego chloru w postaci tabletek, do dezynfekcji sprzętu, powierzchni i przedmiotów, szczególnie w obiektach służby zdrowia.

Właściwości

- Szerokie spektrum mikrobiologiczne łącznie ze sporami *Clostridium difficile* w krótkim czasie działania;
- aktywny zarówno w warunkach czystych jak i w obecności zanieczyszczeń organicznych;
- skuteczny w niskich stężeniach i niskich temperaturach;
- gotowy, czysty roztwór roboczy jest stabilny i aktywny co najmniej jeden dzień roboczy co zostało potwierdzone badaniami.
- łatwe i precyzyjne przygotowanie roztwór roboczych bez konieczność stosowania urządzeń dozujących;
- oparty na jednej z najbardziej powszechnych i sprawdzonych substancji - aktywnym chlorze (NaDCC).

Zastosowanie

- Do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów niezanieczyszczonych jak i zanieczyszczonych substancjami organicznymi;
- posiada właściwości wybielające i dezodorujące - nadaje się doskonale do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych (sanitariaty, kratki ściekowe, zlewy) po ich uprzednim umyciu;
- możliwość zanurzania w roztworach w celu dezynfekcji kaczek, basenów i sprzętu jednorazowego;
- do dezaktywacji rozlanej krwi i innych wydzielin i wydaliny;
- do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością; w zakładach żywienia zbiorowego, kuchniach, kuchenkach oddziałowych.



Suma Tab D4 Tab

Dozowanie i sposób użycia

Dezynfekcja ogólna powierzchni i przedmiotów niezanieczyszczonych substancjami organicznymi.

Ilość tabletek	Ilość wody	Zawartość aktywnego chloru	Czas ekspozycji	Spektrum działania	Stężenie Suma Tab D4
1 tabletki	1.5 litra wody	1000 ppm	15 minut	B, F, V	0.18%
2 tabletki	1.5 litra wody	2000 ppm	15 minut	B, F, V, Tbc	0.36%
5 tabletek	1.5 litra wody	5000 ppm	15 minut	B, F, V, Tbc, S	0.90%

Dezynfekcja powierzchni i przedmiotów zanieczyszczonych substancjami organicznymi.

Ilość tabletek	Ilość wody	Zawartość aktywnego chloru	Czas ekspozycji	Spektrum działania	Stężenie Suma Tab D4
4 tabletek	1.5 litra wody	4000 ppm	30 minut	B, F, V, Tbc	0.72%
6 tabletek	1.5 litra wody	6000 ppm	15 minut	B, F, V, Tbc	1.08%
10 tabletek	1.5 litra wody	10 000 ppm	15 minut	B, F, V, Tbc, S	1.80%

- ⌚ Roztwory należy przygotowywać bezpośrednio przed użyciem.
- ⌚ Przygotować roztwór preparatu rozpuszczając odpowiednią do zastosowania liczbę tabletek w 1,5 litra wody.
- ⌚ Przygotowanym roztworem przemywać powierzchnie lub zanurzyć w nim dezynfekowane przedmioty takie jak kaczki, baseny, nerki, sprzęt jednorazowy.
- ⌚ Odczekać 15 minut.
- ⌚ Przedmioty po dezynfekcji wypłukać w czystej wodzie i odczekać aż wyschną.

Inaktywacja zanieczyszczeń organicznych

- ⌚ Rozlaną krew, wydzieliny i wydaliny zalać roztworem o stężeniu 10 000 ppm aktywnego chloru, następnie po 15 minutach usunąć zanieczyszczenia jednorazowym ręcznikiem a powierzchnie ponownie zdezynfekować.
- ⌚ Czynności wykonywać w rękawicach ochronnych.
- ⌚ Rękawice i wszystkie inne materiały użyte do dezynfekcji i zbierania zanieczyszczeń umieścić w pojemniku, traktować jak materiał zakaźny.

Skład

Każda tabletki o masie 2,7 g zawiera 1,5 g aktywnego chloru.

100 g zawiera następujące ilości substancji czynnej: 99 g dichloro - izocyjanuranu sodu.

Certyfikaty i atesty

Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 0891/04.

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji (na opakowaniu)

Środki ostrożności

Kompletne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z Suma D4 Tab znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego dostępne na stronie www.diversey.com.

Opakowania handlowe

Zakręcany, szczelny pojemnik 300 tabletek
Nr katalogowy: G10750



Diversey Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5; 00-446 Warszawa
tel.: 22 328 10 00; fax: 22 328 10 01

Copyright©2012 Diversey, All Rights Reserved HC ver.12/12

Diversey
for a cleaner, healthier future™