



**MEDISEPT**



# Velox® Top AF

## Płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni

Velox® Top AF to alkoholowy płyn do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni (fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna oraz końcówki stomatologiczne przed procesem sterylizacji). Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze. Działa na wirusy Rota i Adeno.

### Cechy produktu:

- Działa już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe, Adeno, Rota.
- Zalecany do aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, unitów, blatów, szafek pacjenta, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów, wycisków silikonowych, tyłek protetycznych, protez i wycisków.
- Przeznaczony do wszelkich powierzchni pozamedycznych np. w gastronomii, fryzjerstwie oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością.
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni.
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obciowe - opinia Famed.
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy.
- Dostępny w dwóch wersjach zapachowych.

### Korzyści dla użytkownika:

- Gwarancja skuteczności.
- Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni.
- Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów.
- Daje efekt odświeżenia.
- Ekonomiczny w użyciu.



Spray



Działa na Tbc,  
Rota, Adeno



Zapach  
grejfrut



Zapach  
neutralny

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE  
Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ**

# Velox® Top AF

## Zastosowanie:

Velox® Top AF to alkoholowy płyn do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym (fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna oraz końcówki stomatologiczne przed procesem sterylizacji) – jako wyrób medyczny.

Velox® Top AF to alkoholowy płyn do mycia i szybkiej dezynfekcji do stosowania w obszarze medycznym, gastronomii, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Idealnie nadaje się do mycia i dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych – jako produkt biobójczy. Do użytku profesjonalnego.

| SPEKTRUM                            | NORMY WG EN 14885 | OBciążENIE ORGANICZNE |         |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|
|                                     |                   | NISKIE                | WYSOKIE |
| Bakterie                            | EN 1276           | 30 sek.               | 60 sek. |
|                                     | EN 13697          | 30 sek.               | 60 sek. |
|                                     | EN 13727          | 30 sek.               | 60 sek. |
| Grzyby ( <i>C.albicans</i> )        | EN 1650           | 30 sek.               | 60 sek. |
|                                     | EN 13624          | 30 sek.               | 60 sek. |
| Prątki grzylicy ( <i>M.terrae</i> ) | EN 14348          | 30 sek.               | 60 sek. |
| Wirusy osłonkowe                    | DVV/RKI           | 30 sek.               | 30 sek. |
| Wirus Rota                          | EN 14476          | 30 sek.               |         |
| Wirus Adeno                         | EN 14476          | 60 sek.               |         |
| Wirus BVDV                          | DVV/RKI           | 30 sek.               |         |

## Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie (można przetrzeć jednorazowym ręcznikiem). W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą. Produkt wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

## Skład: substancja czynna w 100 g preparatu:

40 g propan-2-ol,  
20 g etanol,  
0,39 g aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym,  
0,25 g chlorek didecyldimetyloamoniowy.

## Wersje zapachowe:

neutral, grapefruit

## Opakowanie handlowe:

butelka 1 l ze spryskiwaczem,  
kanister 5 l



## Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6140/15

Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych.  
Przeznaczony do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

Karta charakterystyki dostępna na stronie [www.medisep.pl](http://www.medisep.pl)

Wersja neutral

Wersja grapefruit



Wytwórca:  
**MEDISEPT Sp. z o.o.**  
ul. Ludwika Spiessa 4  
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22  
[info@medisept.pl](mailto:info@medisept.pl)  
[www.medisep.pl](http://www.medisep.pl)

Data opracowania: 02.2024 rev.2